

# FAMILY MEDICALCHAIR i.1

## ファミリーメディカルチェアi-1

FMC-150

### 仕様

品名・型番	ファミリーメディカルチェアi-1 FMC-150	
使用電源	AC100V	
定格消費電力	198W	
定格周波数	50-60Hz	
定格時間	30分	
上半身	もみ速さ	6段階 50Hz:最小13回/分、最大33回/分 60Hz:最小12回/分、最大32回/分
	たたき速さ	4段階 50Hz:最小284回/分、最大600回/分 60Hz:最小280回/分、最大590回/分
	もみ玉の幅	3段階(狭、中、広)
	上下移動速さ	50Hz:約25秒で1往復 60Hz:約21秒で1往復
	もみ玉の上下移動範囲	約59cm(部分ローラーのとき約15cmの範囲で自動反復)
	自動コース機能	メディカルコース 5種類 快適コース 3種類 (自動指圧点検出機能付き)
自由選択コース機能	上半身モード 10種類 下半身モード 3種類	
下半身マッサージ	エア圧力 強:約23kPa 中:約20kPa 弱:約17kPa	
オートタイマー	約15分(自動コース時は異なります)	
バイブレーター機能	背・座 2種類 強弱2段階切り換え式	
フットレストの位置	調節範囲:約10cm	
リクライニング角度	水平面に対し、約120°~170°無段階(電動リクライニング)	
本体の寸法	幅約74cm×奥行約113(181)cm×高さ約108(58)cm ( )内の数字は最大リクライニングおよびフットレスト水平時	
重量	約67kg	
外装布地	起毛トリコット(ポリエステル100%)	
付属品	アース線	
類別及び一般的名称	家庭用電気マッサージ器	
医療用具製造業許可番号	31BZ0017	

### ファミリー株式会社 サービスセンター

東京支店	〒167-0034 東京都杉並区上荻1-16-14(武蔵会館ビル4階)	TEL.(03)3392-7100(代)
大阪支店	〒533-0031 大阪市東淀川区西淡路1丁目1-32(新大阪アースビル6階)	TEL.(06)6320-1616(代)
仙台営業所	〒984-0047 仙台市若林区木ノ下3丁目1-2	TEL.(022)291-3484(代)
札幌営業所	〒004-0022 札幌市厚別区厚別南1丁目17-1(高木ビル1階)	TEL.(011)896-6555(代)
名古屋営業所	〒460-0011 名古屋市中区大須1丁目35-18(一光大須ビル1階)	TEL.(052)223-1641(代)
広島営業所	〒733-0033 広島市西区観音本町1丁目21-5	TEL.(082)231-0227(代)
福岡営業所	〒810-0071 福岡市中央区那ノ津2丁目6-4(九産ビル3階)	TEL.(092)711-1567(代)

このたびは、ファミリーメディカルチェアi-1をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管してください。

※保証書は、お買い上げの際必ずお受け取りの上、「取扱説明書」とともに大切に保管してください。



### もくじ

- 安全上のご注意 ..... 1~3
- おもな特長と効能・効果 ..... 4
- ご使用前の準備について知りたいとき  
ご使用前に ..... 5・6  
各部の名前とはたらき ..... 7~9  
マッサージの種類と特長 ..... 10
- 操作方法を知りたいとき  
マッサージの主な操作方法  
自動コースのマッサージ ..... 11~14  
自由選択コースのマッサージ ..... 15~17  
動作選択時の液晶表示 ..... 18  
コースの変更 ..... 19・20
- 保管とお手入れの仕方 ..... 21・22
- 故障かな?と思ったら ..... 23
- アフターサービスについて・安全のために商品の点検を ..... 24
- 仕様 ..... 裏面



### 取扱説明書 保証書別途添付

日本国内専用  
(この製品に添付の保証書は、日本国内においてのみ有効です。)  
JAPANESE EQUIPMENT  
SPECIFICATION WARRANTY  
APPLIES ONLY IN JAPAN



# 安全上のご注意①




■ご使用いただく前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みください。




 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると人が障害を負う可能性または物的損害のみの発生が想定される内容。

## 図記号と説明

 警告 および 注意	 禁止	 分解禁止	 接触禁止	 風呂、シャワー等の水場での使用禁止
	 強制	 アース線を接続する	 電源プラグをコンセントから抜く	

お読みになったあとも、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

ご使用場所の注意点		 <b>警告</b>
 禁止	●浴室やサウナなど、湿度の高いところには置かないでください。感電や故障の原因になります。	
 禁止	●ゴミやホコリの多いところ、または周囲温度の高いところ(40℃以上)では使用しないでください。火災・故障の原因になります。	
	●ストーブのそばや直射日光のあたるところには絶対に設置しないでください。内部温度が上がると危険です。	



ご使用場所の注意点		 <b>注意</b>
 アース取り付け	●万一の感電防止のために、アース線を取り付けてください。 1) 家屋にアース端子がある場合 本機後側のフレームにあるアース端子のネジにアース線(ビニール絶縁電線1.25mm <sup>2</sup> )を接続し、他端部の先端の皮をむき、家屋のアース端子に確実に接続してください。アースがはずれたり、端子がゆるんでいないか、ときどき点検してください。 2) 家屋にアース端子がない場合 お買い上げの販売店にご相談ください。	
 禁止	アース線はガス管・水道管・電話線には絶対に接続しないでください。	



### ※使用上のお願い





冷えきった室内の温度を上げて使用するときは、室温を急に上げず徐々に上げてください。

本機を冷えきった状態のまま暖かい室内に持ち込んだときは、1時間ほど待ってから使用してください。

動作部に露が生じ、性能を十分発揮できなくなることがあります。





ご使用前の注意点		 <b>警告</b>
 強制	●次の方は必ず医師に相談の上ご使用ください。 (事故や体調不良を起こすおそれがあります。) ◎医師の治療を受けている人や、特に体に異常を感じている人。◎急性症状のある人。 ◎悪性の腫瘍のある人。◎心臓に障害のある人。◎生理中や妊娠している人。◎安静を必要とする人。 ◎過去の事故や疾病等により背骨に異常のある人や背骨が曲がっている人。◎骨粗鬆症の人。 ◎かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人。◎熱の高い人。◎知覚障害のある人。 ◎ペースメーカー等の体内植込型医用電子機器を使用している人。◎皮膚疾患のある人。 ◎脚部に重度の血行障害のある人。◎重度の糖尿病の人。	
	●本機は床面の平らなところに置いて使用してください。	
	●ご使用前はリクライニングを完全に起こし、体調に応じてリクライニング角度を調節してください。	
	●ご使用前には、必ず背パッドを上げて、本体の布地が破れていないか確認してください。また、その他の部分に、布地の破れがないのかも確認してください。(どんな小さな破れでも、直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、サービスセンターにご連絡ください。) 布地が破れた状態で使用すると、ケガや感電の恐れがあります。	



ご使用前の注意点		 <b>注意</b>
 禁止	●この取扱説明書の使用法以外の使い方をしないでください。また、本機と他の治療器や電気毛布などを併用しないでください。体に悪い影響を与えたりケガの原因になります。	
	●電源コードを本機の脚で踏まないでください。また、電源コードの上に重い物をのせたり、電源コードを本機に巻きつけて使用しないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因になることがあります。	
	●交流100V以外では使用しないでください。火災・感電の原因になります。	
	●本機を倒さないでください。	
	●電源コードや電源プラグがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。	


ご使用時の注意点		 <b>警告</b>
 分解禁止	●裏カバーをはずさないでください。内部にさわると感電するおそれがあります。	
	●お客さま自身での改造・分解・修理はしないでください。火災・感電の原因になります。	
 禁止	●子どもや、意思表示ができない人には使わせないでください。	
	●背もたれのうしろや座・フットレストの下で子どもやペットを遊ばせないでください。ケガをするおそれがあります。	
	●使用中は子どもを近づけないでください。	
	●アームレストや上がったフットレスト、背もたれの上には乗らないでください。転倒してケガをするおそれがあります。	
 プラグを抜く	●誤って水をかけたり、傷つけたりしたときは、すぐに電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原因になります。お買い上げの販売店までご連絡ください。	
	●布地が破れ、内部が露出したときは使用せず、電源プラグをコンセントから抜いてください。お買い上げの販売店に修理を依頼してください。	



## 安全上のご注意②

ご使用時の注意点	⚠ 注意
<p> 禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●就寝時には使用しないでください。また、使用中に眠らないでください。素裸で使用しないでください。ケガの原因になります。</li> <li>●頭、ひじ・ひざなどの関節部、胸部、腹部には使用しないでください。気分が悪くなったり、ケガの原因になります。</li> <li>●ぬれた体ですわったり、ぬれた手で操作したりしないでください。感電・故障の原因になります。</li> </ul>	
<p> 強制</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●使用中に体に激しい痛みや異常を感じたときは、すぐに使用を中止して医師に相談してください。</li> <li>●体はねじらず、もみ玉ともみ玉の真ん中に背骨がくるようにしてください。もみ玉が背骨の両側に均等に当たらないと、背骨を痛める原因になります。 (マッサージをやわらげたいときは、毛布やタオルケットを敷いて使用してください。)</li> <li>●1回の使用は15分以内にしてください。同一箇所へのご使用は、5分以内にしてください。長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果になります。</li> <li>●動かないときや異常を感じたときは、すぐに使用を中止し、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。</li> </ul>	
<p> 禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●もみ玉が上下する部分に手や足を押し込まないでください。ケガの原因になります。</li> </ul>	
<p> プラグを抜く</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●停電のときは、すぐに電源スイッチを「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いてください。電気が復帰したとき危険です。</li> <li>●落雷の可能性のあるときは、すぐに使用を中止して電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。</li> </ul>	

ご使用後・使用しないときの注意点	⚠ 注意
<p> 禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●電源コードを強く引っ張らないでください。</li> <li>●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電・故障の原因になります。</li> <li>●シート、背もたれ、フットレストなどに重いものを載せないでください。</li> </ul>	
<p> 強制</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●電源プラグを抜く場合は、必ず電源プラグを持って引き抜いてください。コードを引っ張るとコードが傷み、火災・感電の原因になることがあります。</li> <li>●オートタイマー機能により自動停止しますが、電源スイッチは必ず「切」にしてください。子どものイタズラによる事故防止のためにも必ず電源を切ってください。</li> <li>●お手入れのときは必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。</li> <li>●長期間ご使用にならないときは、コンセントから電源プラグを抜いてください。</li> <li>●汚れを取り、湿気の少ないところに保管してください。</li> </ul>	

貸し出し・譲渡時の注意点	⚠ 注意
<p> 強制</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●他の人に譲渡、貸与するときは本機とともにこの取扱説明書を必ずお渡してください。</li> </ul>	

## おもな特長と効能・効果

### 特長

- 上半身は機械、下半身はエアーを採用したハイブリッドマッサージ機能。上半身は4つのもみ玉によるソフトで、技法にこだわった多彩なマッサージ。下半身は10個のエアーセルによりきめ細かいマッサージ。
- 多彩なコース機能。  
5種類のメディカルコース。  
3種類の快適コース。  
自動指圧点検出機能。
- ガイドメッセージを表示する液晶ディスプレイ付リモコン。
- 座（おしり部）及び背にバイブレーター内蔵。
- フットレストの位置調節が可能で身長に合わせたふくらはぎのマッサージができます。
- 床面に対して約120°～170°(無段階)の電動リクライニングができます。
- エアーによるフットレスト昇降機能。(単独及びリクライニングと連動)
- オートタイマー機能。

### 効能・効果


あんま、マッサージの代用として、以下の効能・効果があります。

疲労回復・血行をよくする・筋肉の疲れをとる  
筋肉のこりをほぐす・神経痛、筋肉痛の痛みの緩解



# 各部の名前とはたらき


## 本体

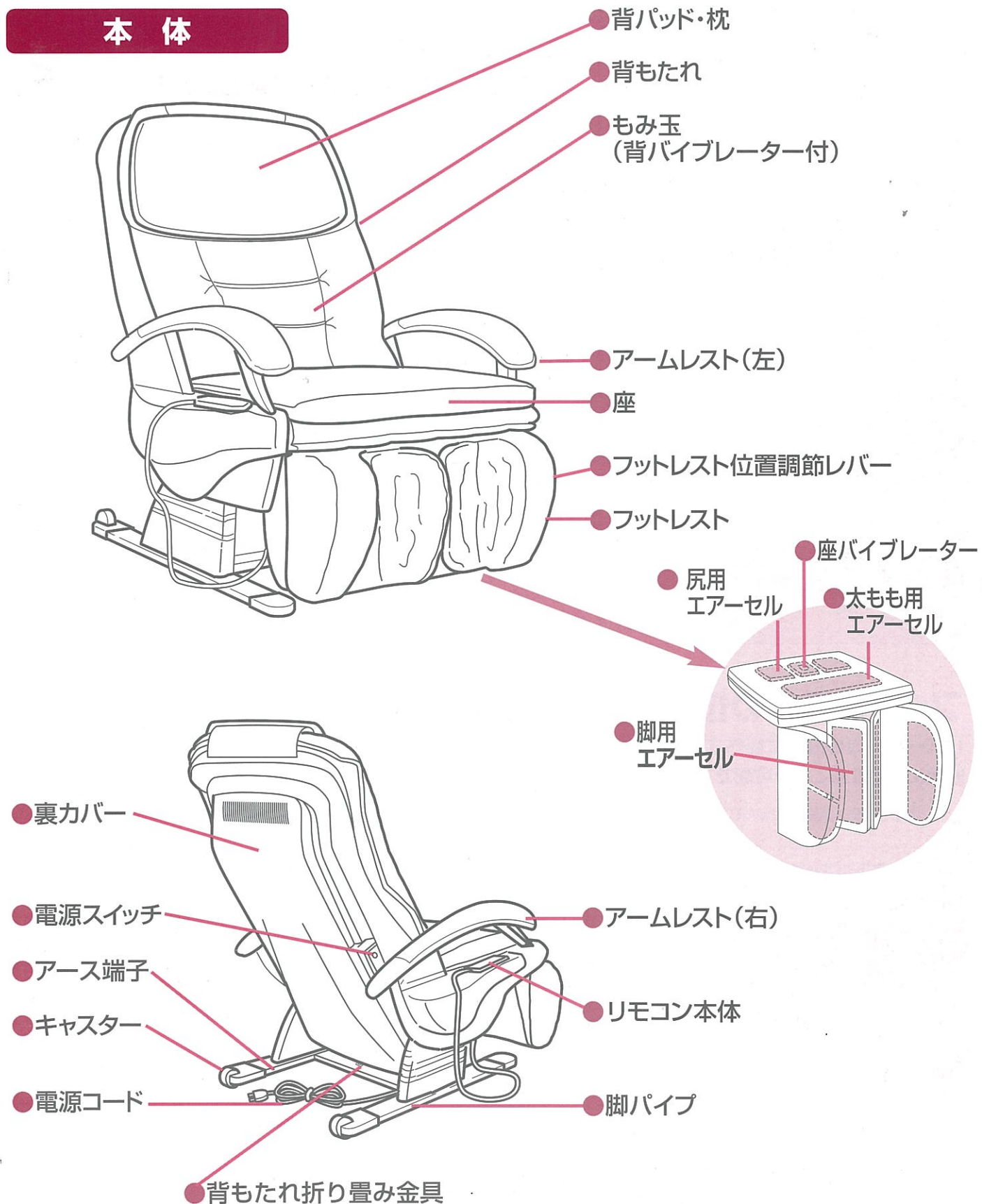

## リモコン



## 扉内部

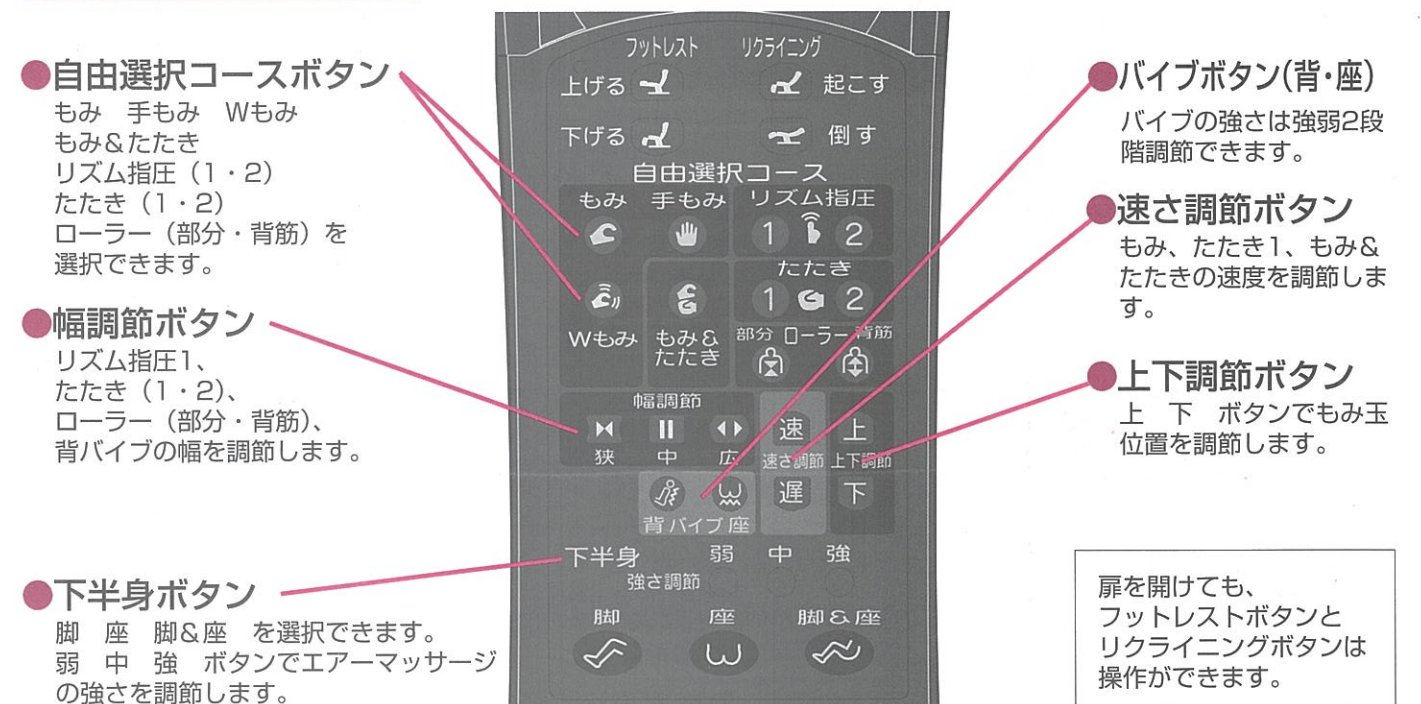

扉を開けても、フットレストボタンとリクライニングボタンは操作ができます。

**警告**

リモコンの上に座ったり、リモコンを落としたり、踏んだり、リモコンのコードを強く引っ張ったりしないでください。破損の原因となります。

**注意**

操作は必ず乾いた指で行ってください。先のとがったものや堅いものを使用すると破損の原因となります。リモコンの扉にむりな力を加えないでください。



## リモコン

### ●液晶表示 大

実行中の指圧点、背バイク解除、残り時間を表示します。P9参照。

### ●電源ボタン

リモコンの入・切を行います。

### ●フットレストボタン

上げる 下げる ボタンでフットレスト角度を調節します。

### ●扉

下記扉内部参照。

### ●快適コースボタン

おはよう おやすみ おしりのボタンで3コースを選択できます。

### ●液晶表示 小

実行中の動作内容を表示します。P9参照。

### ●肩位置調節ボタン

指圧点検出動作時に ↑ ↓ で肩位置調節します。(自動コースのみ)

### ●リクライニングボタン


起こす 倒す ボタンでリクライニング角度を調節します。

### ●メディカルコースボタン

1 2 3 4 5 の番号ボタンで5コースを選択できます。

### ●背バイク解除

自動コース時、背バイクを解除したいときに使います。

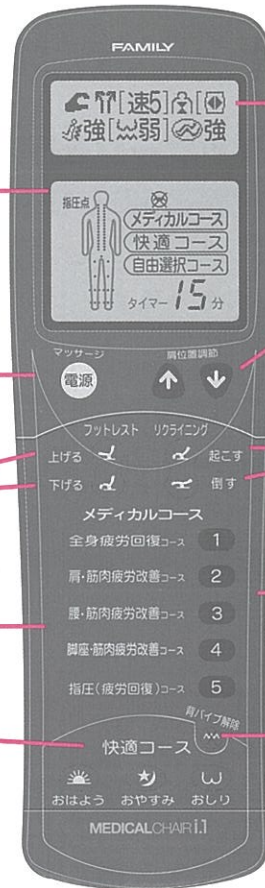

## 扉 内 部

### ●自由選択コースボタン

もみ 手もみ Wもみ  
もみ&たたき  
リズム指圧 (1・2)  
たたき (1・2)  
ローラー (部分・背筋) を選択できます。

### ●幅調節ボタン

リズム指圧1、  
たたき (1・2)、  
ローラー (部分・背筋)、  
背バイクの幅を調節します。

### ●下半身ボタン

脚 座 脚&座 を選択できます。  
弱 中 強 ボタンでエアーマッサージの強さを調節します。

### ●バイクボタン(背・座)


バイクの強さは強弱2段階調節できます。

### ●速さ調節ボタン

もみ、たたき1、もみ&たたきの速度を調節します。


### ●上下調節ボタン

上 下 ボタンでもみ玉位置を調節します。

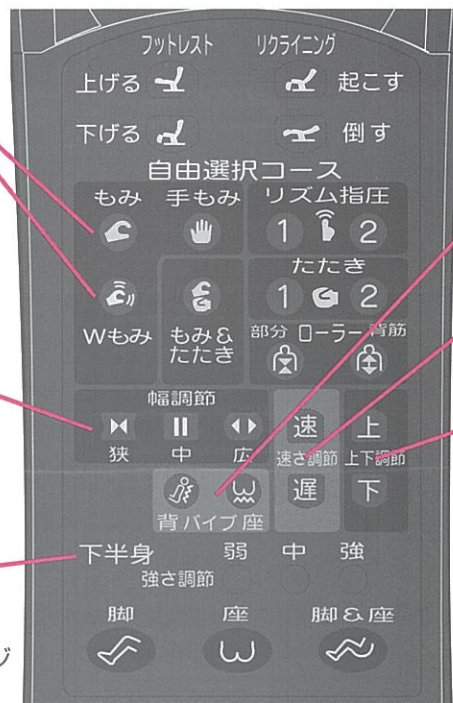

扉を開けても、フットレストボタンとリクライニングボタンは操作ができます。

## 液晶表示 大 について

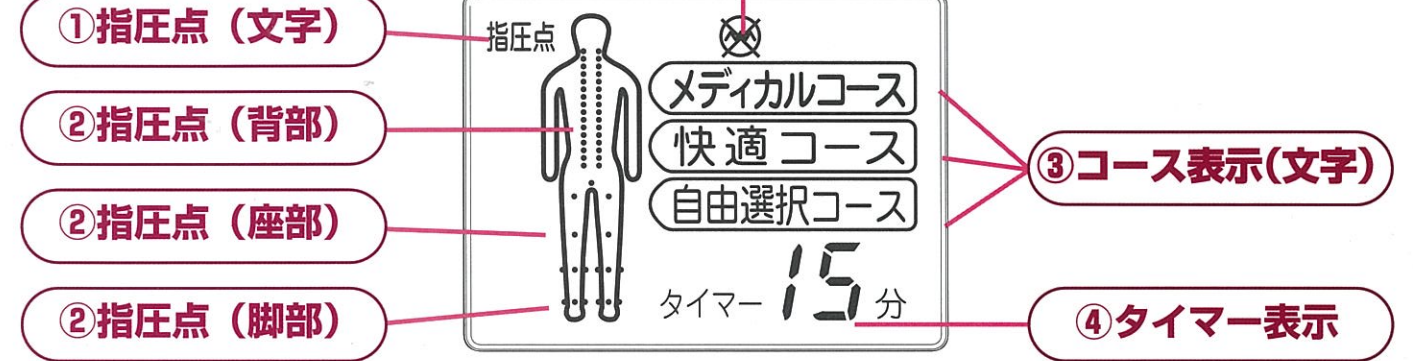

### ①指圧点 (文字)

### ②指圧点 (背部・座部・脚部)

マッサージが行われているときに、各点が点灯または点滅します。

### ③コース表示 (文字)

### ④タイマー表示

動作の残り時間を1分単位で表示します。

### ⑤背バイク解除

自動コースの動作中に背バイク解除ボタンを押すと点灯し、もう一度押すと消灯します。

## 液晶表示 小 について

●動作内容を文字又はイラストで表示します。

●表示の詳細についてはP.18を参照してください。

### ⚠ 警告

リモコンの上に座ったり、リモコンを落としたり、踏んだり、リモコンのコードを強く引っ張ったりしないでください。破損の原因となります。

### ⚠ 注意

操作は必ず乾いた指で行ってください。先のとがったものや堅いものを使用すると破損の原因となります。リモコンの扉にむりな力を加えないでください。



# マッサージの種類と特長

●自動コースと自由選択コースがあります。

## 自動コース

P.11に示すコースボタンにより、お好みのコース機能を選んで、お使いいただけます。

## メディカルコース

### 全身疲労回復コース

●元気がでない、疲れやすい、身体がだるいなどの症状がある人で疲れの原因がはっきりしない方におすすめするマッサージコースです。

### 肩・筋肉疲労改善コース

●首から肩にかけての部分が疲労した方におすすめするマッサージコースです。

### 腰・筋肉疲労改善コース

●腰の筋肉が疲労した方におすすめするマッサージコースです。

### 脚座・筋肉疲労改善コース

●腰から脚にかけて痛みやしびれがある方におすすめするマッサージコースです。

### 指圧（疲労回復）コース

●指圧動作に重点をおいた、疲労回復のためのマッサージコースです。

## 快適コース

### おはようコース

●朝の目覚めがすっきりしない、前日の疲れがまだ残っているという方におすすめするマッサージコースです。

### おやすみコース

●就寝前のご使用をおすすめするマッサージコースです。

### おしりコース

●バイブレーションとエアマッサージの組み合わせ動作により、おしり部用に使用するマッサージコースです。

## 自由選択コース

P.15に示すボタンにより、お好みのマッサージ機能を選んで、お使いいただけます。

# マッサージの種類と操作方法①




## 自動コース

- あらかじめ設定されたメニューで自動マッサージを行います。
- メディカルコース5種類と快適コース3種類があります。

## リモコン


### 下半身エアーマッサージの強さ調節

下半身エアーマッサージの強さは中に設定されていますが、お好みに応じて、強さは3段階に調節できます。

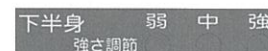


### 背パイプ解除

コース動作のなかに含まれる背パイプは、お好みにより背パイプ解除ボタンで停止と実行を選べます。

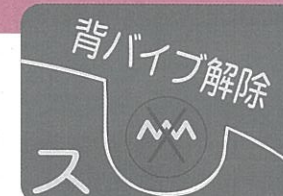

### コースの変更 (P.19~20参照)

- 自動コース→自動コース  
タイマーはリセットされます。自動コース実行中に他の自動コースのボタンを押すと、もみ玉が一度収納状態にもどり、再度、自動指圧点検出動作から開始します。
- 自動コース→自由選択コース  
タイマーはリセットされます。コース実行中にリモコンの扉を開けて、自由選択コースのボタンを押すと、押した時点で自動コースを中断し、選択した動作を実行します。
- 自由選択コース→自動コース  
タイマーはリセットされます。自由選択実行中にリモコンの扉を閉じて、自動コースのボタンを押すと、もみ玉が一度収納状態にもどり、自動指圧点検出動作から開始し、自動コースを行います。

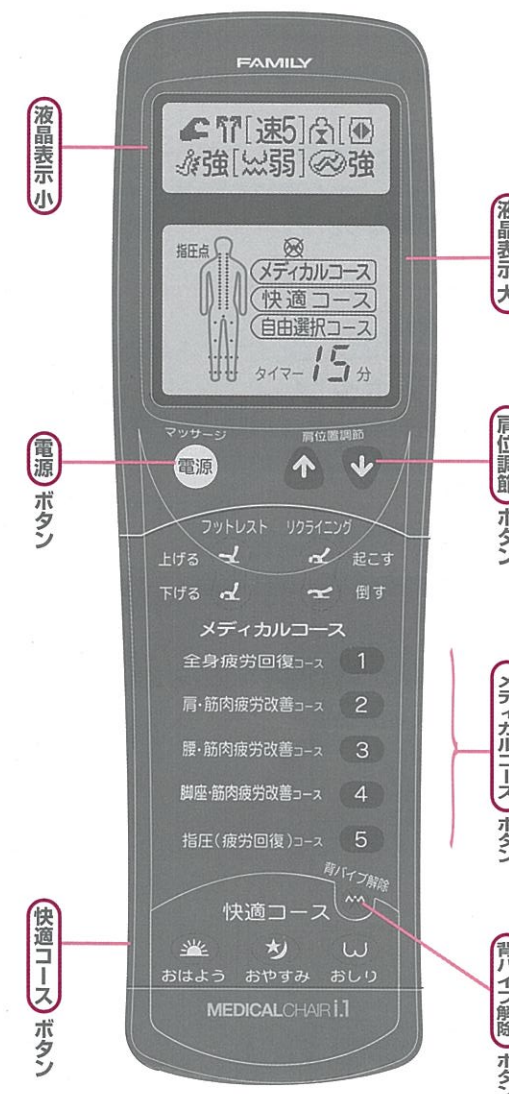

ご注意：途中で終了する場合、動作中に電源ボタンを押せば収納動作を行った後停止します。

## 注意

●もみ玉の間に手や足を入れしないでください。もみ玉は「はさむ力」がたいへん強いので、ケガをすることがあります。

## お知らせ

- 速度を遅くして、もみ玉に必要以上の力が加わると、動きが止まる場合がありますが、故障ではありません。
- エアーマッサージ中、フットレストの上下動作をおこなうと、エアーマッサージは安全上のため停止します。
- 自動コースは、身長によって実際のコース時間とリモコンの表示時間が異なる場合がありますが、故障ではありません。



# マッサージの種類と操作方法 ①




## 自動コース

- あらかじめ設定されたメニューで自動マッサージを行います。
- メディカルコース5種類と快適コース3種類があります。

### リモコン

#### 下半身エアーマッサージの強さ調節

下半身エアーマッサージの強さは中に設定されていますが、お好みに応じて、強さは3段階に調節できます。

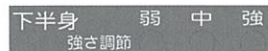

#### 背パイプ解除

コース動作のなかに含まれる背パイプは、お好みにより背パイプ解除ボタンで停止と実行を選べます。



#### コースの変更 (P.19~20参照)

##### ●自動コース→自動コース


タイマーはリセットされます。自動コース実行中に他の自動コースのボタンを押すと、もみ玉が一度収納状態にもどり、再度、自動指圧点検出動作から開始します。

##### ●自動コース→自由選択コース

タイマーはリセットされます。コース実行中にリモコンの扉を開けて、自由選択コースのボタンを押すと、押した時点で自動コースを中断し、選択した動作を実行します。

##### ●自由選択コース→自動コース

タイマーはリセットされます。自由選択実行中にリモコンの扉を閉じて、自動コースのボタンを押すと、もみ玉が一度収納状態にもどり、自動指圧点検出動作から開始し、自動コースを行います。

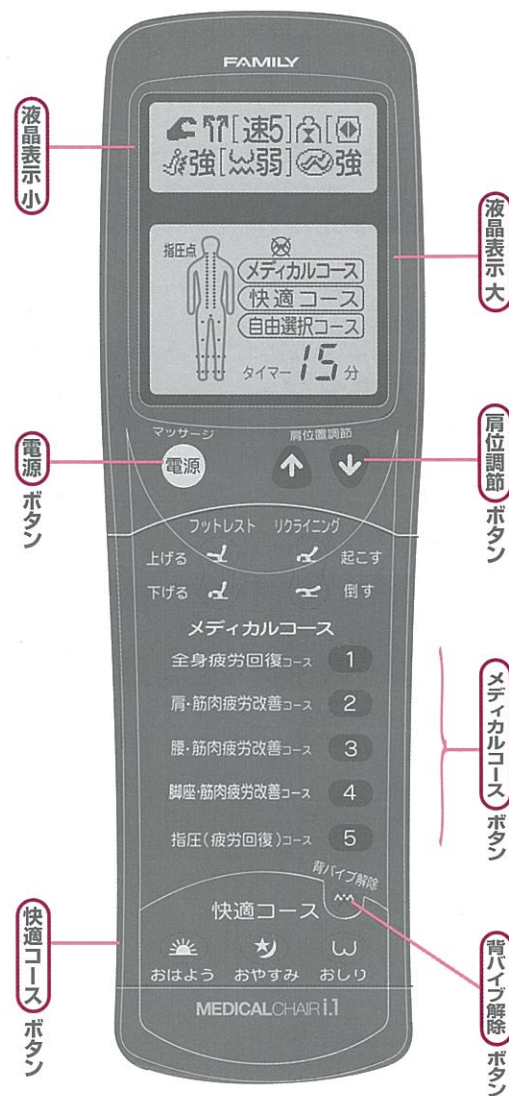


**ご注意：**途中で終了する場合、動作中に電源ボタンを押せば収納動作を行った後停止します。

### 注意

●もみ玉の間に手や足を入れないでください。もみ玉は「はさむ力」がたいへん強いので、ケガをすることがあります。

### お知らせ

- 速度を遅くして、もみ玉に必要以上の力が加わると、動きが止まる場合がありますが、故障ではありません。
- エアーマッサージ中、フットレストの上下動作をおこなうと、エアーマッサージは安全上のため停止します。
- 自動コースは、身長によって実際のコース時間とリモコンの表示時間が異なる場合がありますが、故障ではありません。

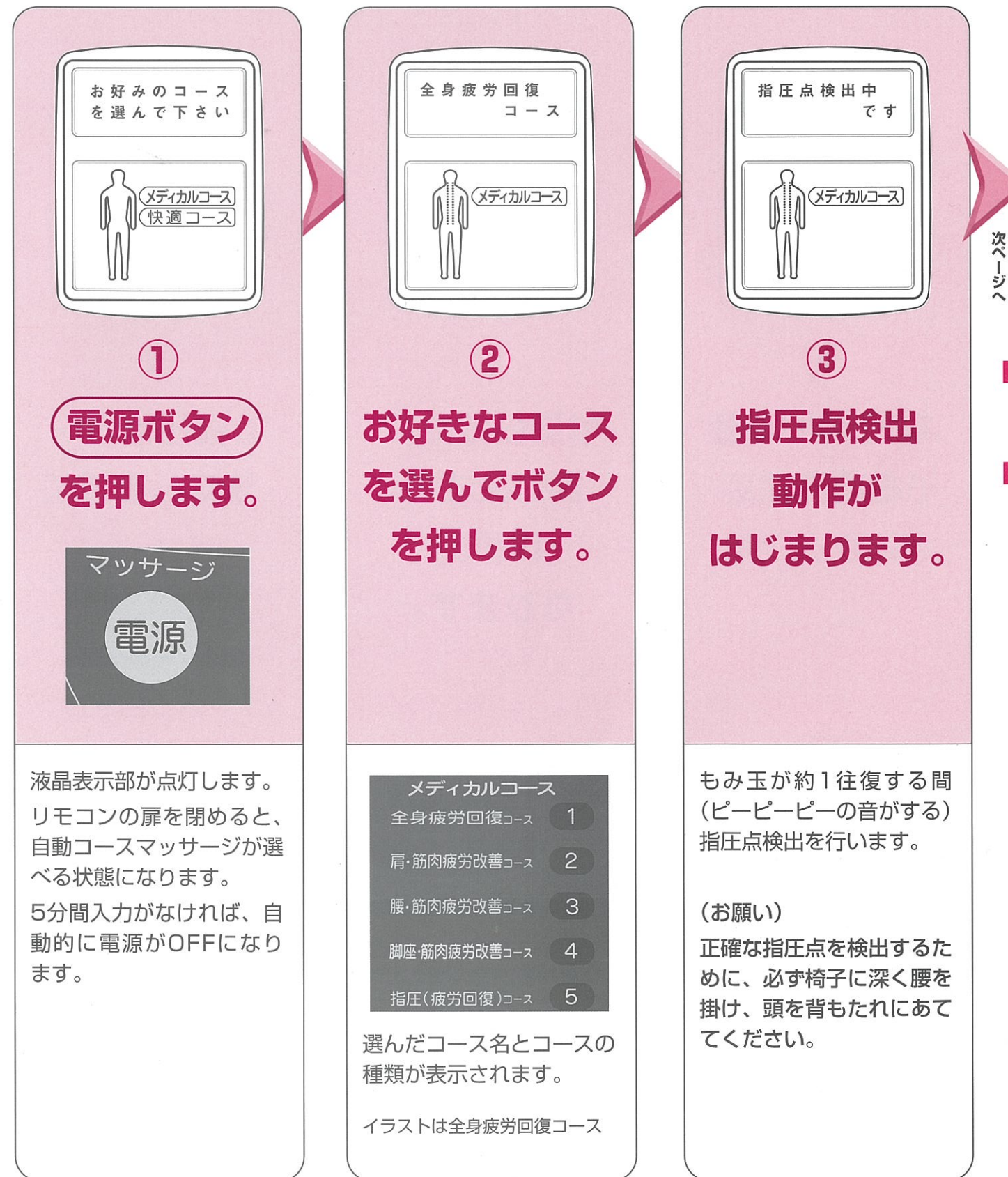



# マッサージの種類と操作方法②



④

指圧点が検出  
されます。



⑤

肩位置を  
調節できる  
状態に  
なります。



ピッピ、ピッピ、ピッピという音が鳴っている間（もみ動作中）は肩位置調節ボタンでもみ玉を上下に調節できます。  
調節しなくてもよい場合は、そのままにしておきます。



⑥

指圧点が  
決定します。



⑦

マッサージが  
はじまります。

液晶表示部にコース終了までの動作状況が表示されます。  
液晶表示 小：各コースの効能を示す説明を一定の間隔で繰り返します。  
液晶表示 大：コース内容に応じた指圧点が点灯します。  
タイマーは残り時間のめやすを表示します。



⑧

マッサージが  
終わります。

もみ玉が収納位置（背もたれ上部）へもどります。

途中で、マッサージを終了する場合は、電源ボタンを押してください。  
この場合も同じように、もみ玉が収納位置までもどります。



⑨

動作が停止し、  
液晶表示部が  
消灯します。



# マッサージの種類と操作方法 ③



## 自由選択コース

- **もみ** **手もみ** **Wもみ** **たたき1・2**  
**もみ&たたき** **リズム指圧1・2** **部分ローラー** **背筋ローラー**  
**背パイプ** **座パイプ** **下半身(脚、座、脚&座)**


のボタンを用いて、お好みのマッサージを行うことができます。

- **幅調節** **速さ調節** **上下調節** **背パイプ**  
**座パイプ** **下半身強さ調節**

のボタンを用いて、マッサージ動作の調節を行うことができます。

## リモコン

扉を開いた状態

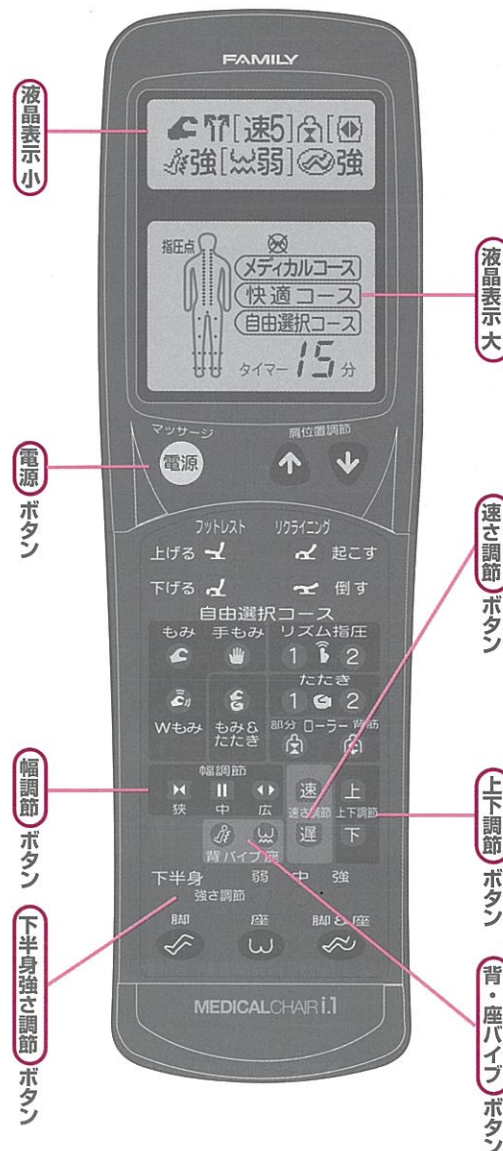

## 動作調節について

### 幅調節

「リズム指圧1」「たたき1・2」「部分ローラー」「背筋ローラー」「背パイプ」の動作中に、もみ玉の幅を「幅調節」の **狭** **中** **広** のボタンで3段階に調節できます。

### 速さ調節

もみ、もみ&たたき、たたき1の動作中に、マッサージの速さを「速さ調節」の **速** **遅** のボタンで段階的に調節できます。「もみ」6段階(1.2.3.4.5.6)、「もみ&たたき」および「たたき1」4段階(1.2.3.4)の調節が可能です。

### 上下調節

「上下調節」の **上** **下** ボタンで、もみ、手もみ、Wもみ、もみ&たたき、リズム指圧1・2、たたき1・2の動作中、マッサージしたいところにもみ玉の位置を調節できます。

### パイプの強さ調節

**背パイプ** **座パイプ** ボタンで、強弱2段階の調節ができ、弱→強→切 と切り換えることができます。

### 下半身エアーマッサージの強さ調節

下半身エアーマッサージの強さを「強さ調節」の **弱** **中** **強** のボタンで3段階に調節できます。

## 自由選択コースの動作の説明

- 選択した動作と、変更した速さ、強さ、幅、上下位置、正逆転などを3秒間表示したあと、P.18のようなイラスト表示になります。

### もみ

もみ動作を行います。  
正逆転、速さ、上下調節可能。

### 背筋ローラー

背筋のばしを行います。  
幅、上下調節可能。

### 手もみ

手もみ感覚に近い動作を行います。  
正逆転、上下調節可能。

### 部分ローラー

部分背筋のばしを行います。  
幅、上下調節可能。

### Wもみ

自動的に、正逆転、速さ調節を繰り返すもみ動作を行います。  
上下調節可能。

### 背パイプ

背中のバイブレーションマッサージを行います。  
幅調節、強さ調節可能。

### もみ&たたき

もみとたたきを同時に行います。  
正逆転、速さ、上下調節可能。

### 座パイプ

おしりのバイブレーションマッサージを行います。  
強さ調節可能。

### リズム指圧1

指圧動作をリズムカルに繰り返します。  
幅、上下調節可能。

### 脚

脚部のエアーマッサージ動作を行います。  
強さ調節可能。

### リズム指圧2

指圧位置を変えながら指圧動作をリズムカルに繰り返します。  
上下調節可能。

### 座

おしり部のエアーマッサージ動作を行います。  
強さ調節可能。

### たたき1

たたき動作を行います。  
幅、速さ、上下調節可能。

### 脚&座

脚及びおしり部のエアーマッサージ動作を行います。  
強さ調節可能。

### たたき2

自動的に速さ調整を繰り返すたたき動作を行います。  
幅、上下調節可能。



# マッサージの種類と操作方法④




## 自由選択コースの操作方法



①

**電源ボタン**  
を押します。

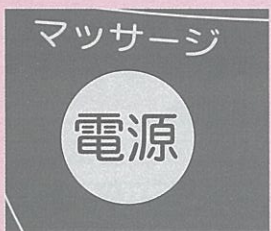

液晶表示部が点灯します。  
リモコンの扉を開けると自由選択コースのマッサージの種類が選べる状態になります。  
5分間入力がなければ、自動的に電源がOFFになります。



②

**お好きな**  
**マッサージの**  
**ボタンを**  
**押します。**

各動作は、一度押すとON、もう一度押すとOFFという操作が基本です。  
動作によっては正転/逆転/切というサイクル操作になります。(イラスト例は、もみ、正転、速さ3) 液晶表示 小 は、選択した機能を3秒間表示したあと、イラスト表示に変わります。(P.18参照)  
液晶表示 大 は、各動作に応じた表示と残り時間を表示します。



③

**15分たつと動作**  
**が終了します。**


もみ玉が収納位置までもどります。  
途中でマッサージを終了する場合、電源ボタンを押してください。この場合も同じようにもみ玉が収納位置までもどります。

④

**動作が停止し、**  
**液晶表示部が**  
**消灯します。**

## 動作選択時の液晶表示

**動作中のイラスト表示**  
自由選択コース動作中は、その動作内容を一画面のイラストで表示します。

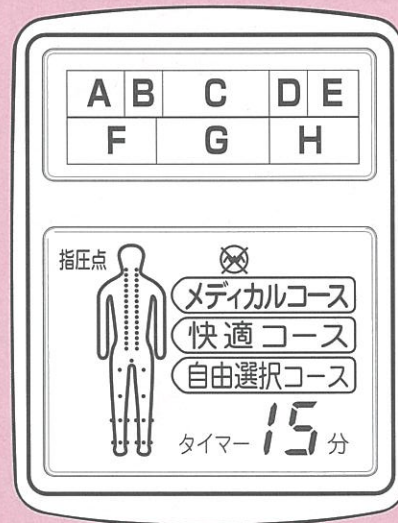

- A: マッサージの種類
- B: 正転、逆転
- C: 速度
- D: ローラー
- E: 幅調節
- F: 背パイプ (強さ)
- G: 座パイプ (強さ)
- H: 下半身 (種類、強さ)

ディスプレイ位置	動作	表示	ディスプレイ位置	動作	表示
A	もみ		E	リズム指圧1	狭
	手もみ			たたき1、2	中
	Wもみ			部分ローラー	広
	F	もみ&たたき		背筋ローラー	弱
		リズム指圧1		背パイプ	強
		リズム指圧2		G	座パイプ
たたき1		強			
B	正転		H	下半身(脚)	弱
	逆転			中	
C	もみ	遅	H	下半身(座)	弱
		速			中
	もみ&たたき	遅			強
D	たたき1	速	H	下半身(脚&座)	弱
	部分ローラー				中
	背筋ローラー				強



# マッサージの種類と操作方法 ⑤



## コースの変更

- 自動コース選択中でも、コース終了まで待つことなく、動作中にほかの動作に切り替えられます。

### ●自動コースから別の自動コースへの変更



①液晶表示部には、全身疲労回復コースの内容が表示されています。



②リモコンの「おはようコース」ボタンを押します。  
タイマーはリセットされます。



③収納（準備）動作が行われます。



④指圧点検出動作が始まります。

### ●自動コースから自由選択コースへの変更



①液晶表示部には、全身疲労回復コースの内容が表示されています。



②お好みの自由選択コースのボタンを押します。  
タイマーはリセットされます。



③選択された内容がイラストで表示され、マッサージが始まります。

### ●自由選択コースから自動コースへの変更



①液晶表示部には、自由選択コースの内容が表示されています。



②リモコンの「おはようコース」ボタンを押します。  
タイマーはリセットされます。



③収納（準備）動作が行われます。



④指圧点検出動作が始まります。

P.13~P.14  
と同様に  
肩位置調節を  
行い、指圧点が  
決定したら、  
切り替えた  
コースの  
マッサージが  
始まります。




# 保管とお手入れの仕方

## 各カバーのはずし方

### フットレスト用カバーの取りはずし方

- ①スライドカバーと座用カバーを固定しているマジックテープをはずします。
- ②スライドカバーとフットレスト用カバーをつなぐチャックをはずします。
- ③フットレスト用カバーと本体を固定しているチャックをはずし、フットレスト用カバーを取りはずします。


※取り付けは、取りはずしの逆の順序で行います。  
(ただし、フットレスト用カバーの袋状になっている部分を、エアセルにきちんとかぶせるようにして取りつけてください。)

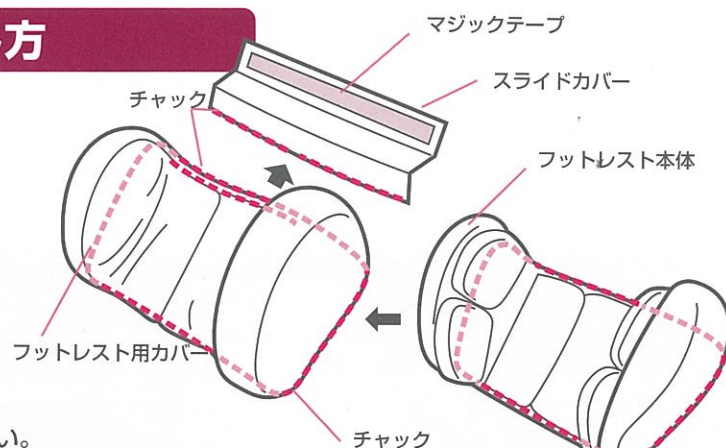

### 座用カバーの取りはずし方

- ①スライドカバーと座用カバーを固定しているマジックテープをはずします。
- ②座用カバーと座本体を固定している6カ所のマジックテープをはずし、座用カバーを取りはずします。


※取り付けは、取りはずしの逆の順序で行います。

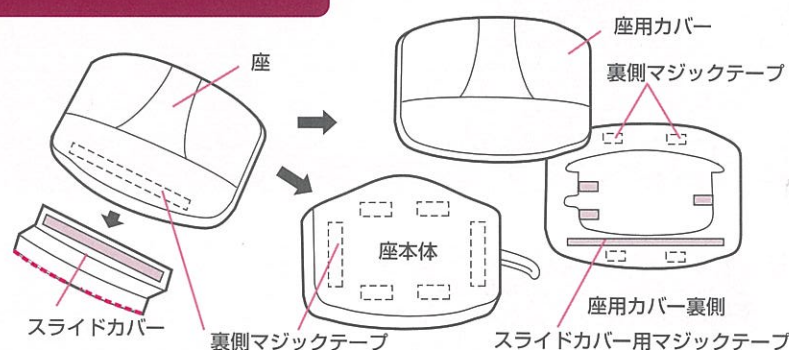

### 背もたれ用カバーの取りはずし方

- ①枕と背もたれ用カバーを固定しているマジックテープをはずし、枕を取りはずします。
- ②背パッドと背もたれ本体をつなぐチャックをはずし、背パッドを取りはずします。
- ③背もたれ用カバーと背もたれ本体を固定している9カ所のマジックテープをはずし、背もたれ用カバーを取りはずします。

※取り付けは、取りはずしの逆の順序で行います。

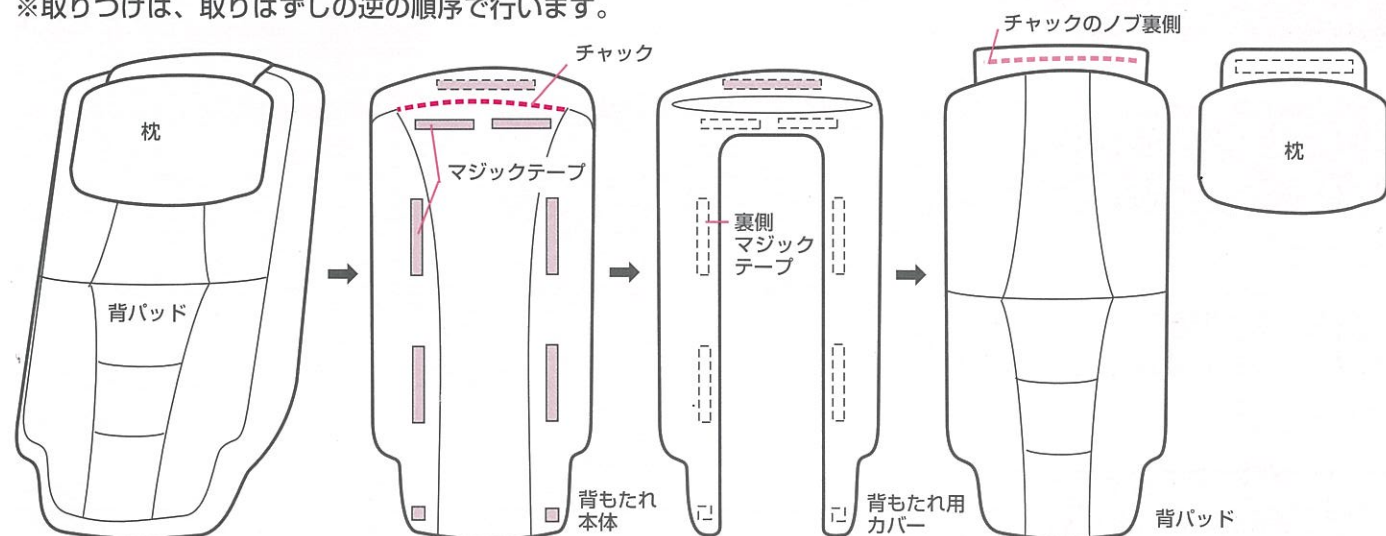

## 保管の仕方

- 汚れやホコリをとった後、湿気の少ない所に整理、保管してください。
- しばらくご使用にならない時はカバーなどをかけ、ホコリがつかないようにしてください。

### ⚠ 注意

直射日光が毎日長時間あたる所、ストーブ等の近くで高温になる所には保管しないでください。布部の変色、変質の原因となります。



## お手入れの仕方

お手入れ前には必ず電源スイッチを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。

## 本体

- プラスチック、パイプ、布部の汚れは中性洗剤を浸し、かたくしぼった布でふき取り、洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取ってください。

### ⚠ 注意

アルコール、その他の溶剤やみがき粉などのお手入れはキズ、変色、ひび割れの原因となりますので使用しないでください。

## リモコン

- リモコンについた汚れは、乾いた布で拭きとってください。

### ⚠ 注意

絶対に濡れたタオルなどで拭かないでください。故障の原因となります。

## 背パッド・枕・各カバー

- 汚れが付いたときは、少量の中性洗剤を溶かしたぬるま湯に柔らかい布をひたし硬くしぼってから拭き取ってください。

### ⚠ 注意

アイロンがけはしないでください。



# 故障かな?と思ったら



●次の点検をしていただき、それでもなお、異常のあるときは事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店またはお近くの「サービスセンター」(裏面)までご相談ください。

●修理技術者以外の方は、分解や修理をしないでください。

状態	原因と直し方
<b>動作時の音</b> ●たたき動作と、もみ玉とたたき動作時のゴト音 ●もみ動作時にもみ玉と布のすれる音(キュッキュッ、ギュウギュウ音) ●エアポンプの音(ブーン音) ●パイプレーターの音(ブーンブーン音)(椅子に座らないとき) ●背もたれが最大リクライニングして止まっているのに、フットレスト上下用のポンプの音がする。(ブーン音)	構造上やむを得ず発生するもので、機能等に影響はありません。
左右のもみ玉の位置が異なる	交互たたき機能を採用しているため、やむをえず発生するもので故障ではありません。
<b>動作しない</b> (リモコンのボタンを、押しても作動しない)	電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。 背もたれ側面の電源スイッチを「入」にしてください。 もみ玉が収納されたのを確認後、もう一度、リモコンのボタンを押してください。
動作が途中で止まる	背もたれ側面の電源スイッチを入れ直してください。その後リモコン操作してください。 正常に戻ればそのままお使いください。 正常に戻らない場合はサービスセンターに連絡してください。
もみ玉が上部へ移動して止まった	もう一度、リモコンのボタンを押してください。
指圧点検出がうまくいかない	椅子に深く腰を掛けて頭を背もたれにつけてください。
もみ玉が途中でとまる	もみ玉に無理な力がかかっていると考えられるため体を浮かせ気味にしてみてください。
リモコンの扉が外れた	リモコンの扉を必要以上に開くと、破損防止のため扉が外れるようになっています。故障ではありませんので、もう一度扉をリモコンにはめ込んでください。

# アフターサービスについて

## 1.保証書について

この製品には保証書を別途添付しております。保証書は販売店にて「販売店・購入日」などの所定事項を記入してお渡ししていますので、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。(修理の際、必要となります。) 保証期間はご購入日より1年間です。ただし、この製品は日本国内専用ですので、海外でご使用になられた場合は、保証期間中でも保証書は無効となります。また、一般家庭以外(業務用など)でご使用の場合は、保証期間中でも有料修理とさせていただきます。

## 2.修理を依頼される時

修理を依頼される前に、23ページをよくお読みください。点検後、まだ異常がありましたらお買い上げの販売店へ次のことをご連絡の上、ご依頼ください。

- 1.お名前・ご住所・お電話番号
- 2.品名・型番…この取扱説明書の裏面をご覧ください。
- 3.製造番号…裏カバー部に貼ってある社銘板をご覧ください。
- 4.お買い上げ日
- 5.故障の状態(できるだけ詳しく:リモコンの液晶部にER-1~8が表示される場合は、その数字もお知らせください。)

- 保証期間中は  
修理の際、保証書をご提示ください。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間が過ぎている場合は  
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって製品機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 販売店にご依頼にできない場合は  
サービスセンター(この取扱説明書の裏面に記載)にご連絡ください。
- 補修用性能部品の最低保有期間  
弊社はこの電気マッサージ器の補修用性能部品の製造打ち切り後最低6年間保有しております。(ただし、縫製部品は除きます)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- アフターサービスについてご不明な点は  
お買い上げの販売店、またはサービスセンターにお問い合わせください。

# 安全のために商品の点検を

## 長期で使用の場合は商品の点検を

こんな症状はありませんか?

- スイッチを入れても、動作しないときがある。
- 電源コードに“ひび割れ”や“傷”がある。
- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- コゲくさいにおいがしたり、動作中に異常な音や振動がする。
- 自動的にタイマーが切れないときがある。
- もみ玉、エアセルのあたる所の布がやぶれている。
- その他の異常や故障がある。



■左記のような症状があれば故障や事故の防止のため、使用を中止し電源プラグをコンセントから抜き、必ずお買い上げの販売店に点検をご依頼ください。

◆上記症状がなくても、お買い上げ後5年ほどたちましたら安全のため点検をお奨めします。点検・費用に要する費用につきましては、お買い上げの販売店にご相談ください。