

アプリ「ルピナス見守り365」の使用方法

ルピナス見守り365は、スマートフォンを通してルピナス使用者(見守りユーザー)の最終利用履歴や登録データ(身長・体重・血圧・脈拍など)を確認することができます。ルピナスをお持ちでなくてもこのアプリを通して離れて暮らす家族の健康状態を見守ることができますので、是非ご活用ください。

● ルピナス見守り365は、ルピナスをお持ちでなくても利用することができます。

1 アプリ「ルピナス見守り365」のダウンロード方法

方法1 QRコードを読み込む



iPhone(iOS)



Android



方法2 App Store、Google Playで「ルピナス見守り365」を検索する

ルピナス見守り365

検索

ダウンロード画面が表示されたら、アプリのダウンロードをおこなう

入手を押す

インストールを押す

iPhone



Android



● アプリ動作環境 iOS9.0以降、Android4.3以降に対応しています

2 アプリを起動

3 ログイン画面



インストール終了後、「ルピナス見守り365」のアイコンを押してアプリを起動してください。

新規で登録する場合

はじめに利用規約をご確認ください。同意いただける場合は「利用規約に同意する」にチェックを入れ、新規登録ボタンを押してユーザーの新規登録をおこなってください。同意いただけない場合はアプリをご利用いただけません。

2回目以降のログインの場合

登録したログインIDとパスワードを入力してログインしてください。

4

アプリ使用者のユーザー登録画面

アプリ「ルピナス見守り365」を使用する方のユーザー登録をおこないます。

入力が終わりましたら内容を確認し、登録ボタンを押してください。

- ログインID (4文字以上のお好きなIDを入力)
- パスワード (8文字以上を設定してください)
- ニックネーム (アプリ内で画面に表示されます)
- メールアドレス (登録に必須の内容ではありませんが、メールアドレスを登録することで、見守りユーザーの健康状態が設定値から外れた際に通知を受け取ることができます)

5

見守りたいルピナス使用者の登録画面 (見守りユーザーコード入力)

見守りたいルピナス使用者(見守りユーザー)の登録をおこないます。

ルピナス付属のタブレットで、見守りたいルピナス使用者の「見守りユーザーコード」を発行してください。

入力後、登録ボタンを押してください。

● 本サービスで表示されるアドバイスは、利用者の健康管理の参考に役立てていただくことを目的としております。測定値は環境や測定機器の使い方、測定姿勢などの様々な要因で変化しますので参考値となります。不安のある方は専門機関や医師の診察・診断をおすすめします。
● Android、Google Play は、Google Inc. の商標です。 ● App Store は、Apple Inc. のサービスマークです。